

疫苗冰箱衛生所稽查前自檢清單

自檢日期：_____

檢查人員：_____

建議於衛生所稽查前一週與稽查當日上午各自檢一次。逐項勾選「符合」或「待改善」，待改善項目請於備註欄記錄處理方式與完成日期。

一、溫度與紀錄

檢查結果	檢查項目	備註
☐ 符合 ☐ 待改善	冰箱現在溫度在 2~8°C 之間，溫度計顯示正常	
☐ 符合 ☐ 待改善	每日溫度記錄表連續無中斷（上午 / 下午各一次），簽名完整 表單：藥品疫苗冰箱溫度記錄表	
☐ 符合 ☐ 待改善	高低溫度計（如 Cooper-Atkins 2560）歸零後重新累計，高低溫皆在範圍內	
☐ 符合 ☐ 待改善	Data Logger 正常記錄中，可讀取並匯出 PDF 溫度報告	
☐ 符合 ☐ 待改善	溫度監視片（如有配置）未變色	

二、設備狀態與保養

檢查結果	檢查項目	備註
☐ 符合 ☐ 待改善	每月保養及測試表已填寫至最近月份（含高低溫警報測試） 表單：疫苗冰箱每月保養及測試表格	
☐ 符合 ☐ 待改善	UPS 不斷電系統測試正常（如有配置），電源線與插座無鬆脫	
☐ 符合 ☐ 待改善	門簾完整無破損，門封條密合、無結霜異常	

三、標示張貼

檢查結果	檢查項目	備註
☐ 符合 ☐ 待改善	「三讀五對」特殊標示張貼於冰箱門上 表單：疫苗冰箱特殊標示・三讀五對	
☐ 符合 ☐ 待改善	溫度異常緊急應變流程張貼於冰箱旁，通報電話清楚可見 表單：疫苗冰箱緊急應變流程	
☐ 符合 ☐ 待改善	疫苗整理盒標籤完整（疫苗名稱、廠牌、批號、效期） 表單：疫苗整理盒標籤 7 / 8 / 9 公分	

四、疫苗擺放管理

檢查結果	檢查項目	備註
☐ 符合 ☐ 待改善	整台冰箱只放疫苗與藥品，無食物、飲料、檢體混放	
☐ 符合 ☐ 待改善	疫苗不貼壁、不塞門邊，冷氣循環空間足夠	
☐ 符合 ☐ 待改善	效期近的疫苗排前（先進先出），無過期疫苗；退回 / 待銷毀疫苗已隔離標示	